

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX NATURAL. LISA, ANATÔMICA, ESTÉRIL E COM PÓ.

Sensitex
Ref: 106 - Lisa

MUCAMBO

Luva cirúrgica esterilizada, produzida à base de látex natural, formato anatômico, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e inerte. É a melhor opção para quem procura a combinação ideal entre a SENSIBILIDADE TÁTIL e PROTEÇÃO. Indicada para proteção de pacientes e profissionais da saúde como barreira física contra infecções por agentes químicos e biológicos.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

NOME TÉCNICO: luvas cirúrgicas



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO COMERCIAL: SENSITEX-SÉRIE 106

Material: Luva de Látex Natural Anatômica

Tamanhos: 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

Espessura média: 0,21 mm

Comprimento médio: 28 cm

Esterilização: Esterilizado por Feixe de Elétrons,
Raio Gama ou Óxido de Etileno

Lubrificante: Com pó Bioabsorvível

Composição: 100% Látex Natural

Superfície: Lisa

Tipo: 1

Validade: 3 anos

Embalagem: embalagem com 1 par/
caixa com 200 pares

Material envelope interno: papel monolúcido

Material envelope externo: papel grau cirúrgico

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Certificação: CA 39.317

Notificação ANVISA nº: 82850579001

Conforme ISO 10282:2014

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº: 100053-01/2025

INDICAÇÃO DE USO

Para utilização em cirurgias.

MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos das mãos já calçados na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvasadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva.

CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 47 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

LUVA DESCARTÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. USO ÚNICO.

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado para pessoas sensíveis ao látex.

FABRICADO POR

Razão Social: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA

CNPJ: 60.594.538/0016-80

Endereço: Av Africa, s/n, quadra F, lote 5 a 7 - parte - distrito industrial – Iguape - CEP: 45.658-468 - Ilhéus/BA

Site: <https://www.newellbrands.com/>

Atendimento ao consumidor: faleconosco.mapaspontexbr@newellco.com

Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº: 8.28505-7

Responsável Técnica: Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco **www.mucambo.com.br**