

## SENSITOUCH®

### LUVAS CIRÚRGICAS DE POLIISOPRENO



Luva cirúrgica esterilizada, anatômica, com dedos curvos, fabricada em **Poliisopreno** (borracha sintética), **isenta de pó**, lubrificada com polímero e **livre de proteínas do látex natural**, reduzindo o risco de reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Indicada para profissionais e pacientes com predisposição a alergias relacionadas aos componentes do látex natural, especialmente aqueles que apresentam sensibilidade a essas proteínas.

- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Livre de pó e proteínas do látex de borracha natural;
- ✓ Sensibilidade, conforto e proteção garantidos.

**NOME TÉCNICO:** luvas cirúrgicas



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**MODELO COMERCIAL:**  
SENSITOUCH - SÉRIE 125

**MATERIAL:**  
Poliisopreno

**TAMANHOS:**  
6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

**ESPESSURA MÉDIA:**  
0,22 mm

**COMPRIMENTO MÉDIO:**  
28 cm

**PRODUTO ESTÉRIL**

**MÉTODO:** Irradiação ou Óxido de Etileno

**LUBRIFICANTE:**  
Isento de pó bioabsorvível

**COMPOSIÇÃO:**  
Borracha sintética

**SUPERFÍCIE:** Palma lisa e textura na ponta dos dedos

**TIPO:** 2

**VALIDADE:** 3 anos

**EMBALAGEM:**  
Embalagem com 1 par / caixa com 200 pares

**MATERIAL ENVELOPE INTERNO:**  
Papel monolúcido

**MATERIAL ENVELOPE EXTERNO:**  
Material Plástico

#### INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

**Certificação:**  
CA 31.349

**Notificação ANVISA Nº:** 82850579004.  
Luva fabricada conforme ABNT NBR ISO 10282: 2014

#### INDICAÇÃO DE USO

Indicada para procedimentos cirúrgicos e invasivos de alta assepsia onde seja necessária proteção total contra reações alérgicas ao látex natural (Hipersensibilidade do Tipo I). Especialmente recomendada para uso em pacientes e por profissionais da saúde diagnosticados com sensibilidade severa à proteína do látex, oferecendo o mesmo conforto, elasticidade e sensibilidade tátil da borracha natural sem seus riscos alergênicos.

#### MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos da mão já calçados na dobra do punho, e pela face palmar calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva.

## CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 46 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

Usuário observe a correlação da versão da instrução de uso indicada com o produto adquirido. Para obter a instrução de uso em formato impresso, sem custo adicional, entre em contato com o SAC 0800 075 4638

## PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

### **LUVA DESCARTÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.**

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

## FABRICADO POR

### **Fabricado e distribuído por: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA**

CNPJ: 60.594.538/0016-80 - Av. África - S/Nº - Quadra F - Lotes 5 a 7 - Dist. Industrial  
CEP 45658-468 - Ilhéus - Bahia -Brasil

**Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº:** 8.28505-7

**Responsável Técnica:** Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

### **Atendimento ao consumidor**

☎ SAC: 0800 075 4638 🌐 [www.mucambo.com.br](http://www.mucambo.com.br)