

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX NATURAL TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE ANATÔMICA ESTÉRIL COM PÓ MUCAMBO

Sensifirm®

Ref: 116 - Antiderrapante

MUCAMBO®

Luva cirúrgica esterilizada com textura antiderrapante, produzida à base de látex natural, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e inerte. Possui formato anatômico e material íntegro que permite maior agilidade e precisão na realização de cirurgias.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

NOME TÉCNICO: luvas cirúrgicas



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS COMERCIAIS: SENSIFIRM - SÉRIE 116

Material: Luva de Látex Natural Anatômica

Tamanhos: 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5

Espessura média: 0,21 mm

Comprimento médio: 28 cm

Lubrificante: Com pó

Superfície: Texturizada e Antiderrapante (Totalidade)

Tipo: 1

Esterilização: Estéril por Feixe de Elétrons

VALIDADE: 3 anos

COMPOSIÇÃO: 100% Látex Natural

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

REGISTRO ANVISA nº: 82850579002

CERTIFICADO DO PRODUTO Nº: 010393-02/2023

INDICAÇÃO DE USO

Para utilização em cirurgias.

MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos das mãos já calçados na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avelal cirúrgico com o punho da própria luva.

CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Dever ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 47 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

Proibido reprocessar. Uso único.

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pessoas sensíveis ao látex.

FABRICADO POR

Razão Social: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA

CNPJ: 60.594.538/0016-80

Endereço: Av Africa, s/n, quadra F, lote 5 a 7 - parte - distrito industrial - Iguape - CEP: 45.658-468 - Ilhéus/BA

Site: <https://www.newellbrands.com/>

Atendimento ao consumidor: 0800 075 4638 | (11) 2133.3000

Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº: 8.28505-7

Responsável Técnica: Mariana Meireles Amaral - CRQ/BA nº 073001811

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco www.mucambo.com.br

