

## LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX NATURAL



Luva cirúrgica esterilizada, anatômica, com dedos curvos, fabricada a base de látex de borracha natural e **texturizada antiderrapante**. Lubrificada com pó bioabsorvível, redução de proteínas do látex natural e resíduos químicos.

Indicada para cirurgias que requerem alta aderência, contribuindo para uma execução mais precisa.

- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Luva texturizada e antiderrapante;
- ✓ Conforto, aderência e precisão garantidos.

**NOME TÉCNICO:** luvas cirúrgicas



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**MODELO COMERCIAL:**  
SENSIFIRM - SÉRIE 116

**MATERIAL:** Luva de Látex Natural Anatômica

**TAMANHOS:**  
6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

**ESPESSURA MÉDIA:**  
0,21 mm

**COMPRIMENTO MÉDIO:**  
28 cm

**PRODUTO ESTÉRIL**

**MÉTODO:** Irradiação ou Óxido de Etileno

**LUBRIFICANTE:**  
Pó bioabsorvível

**COMPOSIÇÃO:**  
100% Látex Natural

**SUPERFÍCIE:** Texturizada e Antiderrapante (Totalidade por face palmar)

**TIPO:** 1

**VALIDADE:** 3 anos

**EMBALAGEM:**  
Embalagem com 1 par / caixa com 200 pares

**MATERIAL ENVELOPE INTERNO:**  
Papel monolúcido

**MATERIAL ENVELOPE EXTERNO:**  
Material Plástico

### INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

**Certificação:**  
CA 39.316

**Notificação ANVISA Nº:** 82850579002.  
Luva fabricada conforme ABNT NBR ISO 10282: 2014

### INDICAÇÃO DE USO

Indicada para procedimentos cirúrgicos gerais e especializados onde se exige alta aderência, assepsia e sensibilidade tátil. Sua textura antiderrapante confere maior segurança e firmeza no manuseio de instrumentais cirúrgicos em ambientes com presença de fluidos.

### MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos da mão já calçados na dobra do punho, e pela face palmar calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva.

## CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 46 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

Usuário observe a correlação da versão da instrução de uso indicada com o produto adquirido. Para obter a instrução de uso em formato impresso, sem custo adicional, entre em contato com o SAC 0800 075 4638

## PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

**LUVA DESCARTÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.**

**ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.**

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Contraindicado para pessoas sensíveis ao látex de borracha natural.

## FABRICADO POR

**Fabricado e distribuído por: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA**

CNPJ: 60.594.538/0016-80 - Av. África - S/Nº - Quadra F - Lotes 5 a 7 - Dist. Industrial  
CEP 45658-468 - Ilhéus - Bahia -Brasil

**Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº:** 8.28505-7

**Responsável Técnica:** Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

## Atendimento ao consumidor

☎ SAC: 0800 075 4638 🌐 [www.mucambo.com.br](http://www.mucambo.com.br)