

MUCAMBO®

Sensitouch® - ref: 125

LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA – SENSITOUCH - REF. 125

A luva cirúrgica Sensitouch 125 é recomendada aos profissionais da saúde e pacientes que apresentam reações alérgicas relacionadas ao látex natural. Produzida à base de poliisopreno, é totalmente isenta de látex natural e pó lubrificante.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Livre de proteínas do látex natural;
- ✓ Garante assepsia no procedimento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Material:** poliisopreno;
- **Tamanhos:** 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5;
- **Espessura média:** 0,22 mm;
- **Comprimento médio:** 28 cm;
- **Lubrificante:** isenta de pó bioabsorvível;
- **Esterilização:** feixe de elétrons ou raios gama;
- **Embalagem:** embalagem com 1 par; caixa com 200 pares;
- **Validade e Esterilidade do produto:** assegurada por O3 (três anos), enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco: www.mucambo.com.br



INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

MS/ANVISA Nº 10092410032 - Produto Médico Hospitalar, fabricado à base da matéria-prima sintética (Poliisopreno), é indicado para profissionais da saúde e pacientes alérgicos às proteínas do látex natural ou prevenção ao desenvolvimento de reações alérgicas aos profissionais predispostos.

CA/MT Nº 31.349 - Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) Vestimenta para prevenção dos riscos de contaminações, quando expostos às cavidades cirúrgicas, exposições sanguíneas ou líquidos corpóreos, conforme NBR ISO 10282:2014 e RDC(s) /ANVISA 55/2011- 94/2016 - (Portarias RAC do INMETRO 332/2012 - 451/12 e 194/2018) - ISO 9001-2015

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avelar cirúrgico com o punho da própria luva;
6. Este produto deve ser conservado em área arejada, protegido de luz solar, fonte de calor e umidade;
7. Produto de Uso Único – Destruir após o uso.