

LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX NATURAL




Luva cirúrgica esterilizada, anatômica, com dedos curvos e fabricada a base de **látex de borracha natural**. Lubrificada com pó bioabsorvível, com redução de proteínas do látex natural e resíduos químicos.

Indicada para a proteção de profissionais da saúde, proporcionando excelente sensibilidade tátil e conforto.

- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Luva lisa e com pó lubrificante;
- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos.

NOME TÉCNICO: luvas cirúrgicas

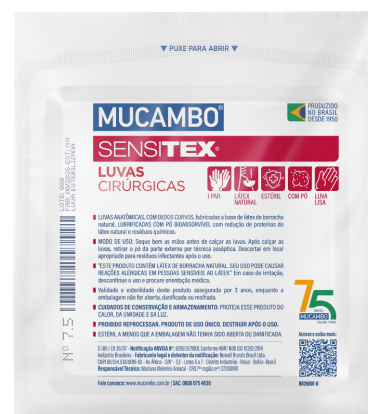

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO COMERCIAL:
SENSITEX - SÉRIE 106

MATERIAL: Luva de Látex Natural Anatômica

TAMANHOS:
6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

ESPESSURA MÉDIA:
0,21 mm

COMPRIMENTO MÉDIO:
28 cm

PRODUTO ESTÉRIL

MÉTODO: Irradiação ou Óxido de Etileno

LUBRIFICANTE:
Pó bioabsorvível

COMPOSIÇÃO:
100% Látex Natural

SUPERFÍCIE: Lisa

TIPO: 1

VALIDADE: 3 anos

EMBALAGEM:
Embalagem com 1 par / caixa com 200 pares

MATERIAL ENVELOPE INTERNO:
Papel monolúcido

MATERIAL ENVELOPE EXTERNO:
Material Plástico

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Certificação:
CA 39.317

Notificação ANVISA Nº: 82850579001
Luva fabricada conforme ABNT NBR ISO 10282: 2014

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para procedimentos cirúrgicos e demais intervenções invasivas que exijam total esterilidade, precisão e alta sensibilidade tátil. Desenvolvida para atuar como barreira física de proteção mecânica e biológica para profissionais da saúde e pacientes em ambientes hospitalares, ambulatoriais, odontológicos e laboratoriais.

MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos da mão já calçados na dobra do punho, e pela face palmar calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva.

CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 46 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

Usuário observe a correlação da versão da instrução de uso indicada com o produto adquirido. Para obter a instrução de uso em formato impresso, sem custo adicional, entre em contato com o SAC 0800 075 4638

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

LUVA DESCARTÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pessoas sensíveis ao látex de borracha natural.

FABRICADO POR

Fabricado e distribuído por: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA

CNPJ: 60.594.538/0016-80 - Av. África - S/Nº - Quadra F - Lotes 5 a 7 - Dist. Industrial
CEP 45658-468 - Ilhéus - Bahia -Brasil

Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº: 8.28505-7

Responsável Técnica: Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

Atendimento ao consumidor

☎ SAC: 0800 075 4638 🌐 www.mucambo.com.br