

LUVA CIRÚRGICA DE POLIISOPRENO

LISA, ANATÔMICA, ESTÉRIL, SEM PÓ E LIVRE DE LÁTEX NATURAL.

Sensitouch®

Luva cirúrgica esterilizada Ref: 125

Luva cirúrgica esterilizada, produzida à base de Poliisopreno, sem pó bioabsorvível e isenta de látex natural. Possui formato anatômico e material íntegro que permite maior precisão e destreza durante as cirurgias. Essa luva é recomendada aos profissionais e pacientes com reações alérgicas aos componentes do látex natural.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Livre de proteínas do látex natural;
- ✓ Garante assepsia no procedimento.
- ✓ Identificação da luva direita e esquerda na parte externa.

NOME TÉCNICO: luvas cirúrgicas

MUCAMBO®



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO COMERCIAL: SENSITOUCH - SÉRIE 125

Material: poliisopreno

Tamanhos: 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5

Espessura média: 0,22mm

Comprimento médio: 28 cm

Esterilização: Esterilizado por Feixe de Elétrons, Raio Gama ou Óxido de Etileno

Lubrificante: Isenta de pó bioabsorvível

Composição: Borracha sintética

Superfície: Palma lisa e textura antiderrapante na ponta dos dedos.

Tipo: 2

Validade: 3 anos

Embalagem: Embalagem com 1 par / caixa com 200 pares

Material envelope interno: papel monolúcido

Material envelope externo: papel grau cirúrgico

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Certificação: CA 31.349

Notificação ANVISA nº: 82850579004

Conforme ISO 10282:2014

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº: CE-LUV-INNOVA-00001-1

INDICAÇÃO DE USO

Para utilização em cirurgias.

MODO DE USO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra dopunho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva;

CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 200 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser retirado da sua embalagem de forma asséptica, para evitar a contaminação ocasionada pela manipulação incorreta. Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 47 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

LUVA DESCARTÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. USO ÚNICO.

As luvas não devem ser armazenadas próximo a objetos pontiagudos, que eventualmente possam perfurar a embalagem e danificar seu conteúdo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

FABRICADO POR

Razão Social: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA

CNPJ: 60.594.538/0016-80

Endereço: Av Africa, s/n, quadra F, lote 5 a 7 - parte - distrito industrial – Iguape - CEP: 45.658-468 - Ilhéus/BA

Site: <https://www.newellbrands.com/>

Atendimento ao consumidor: faleconosco.mapaspontexbr@newellco.com

Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº: 8.28505-7

Responsável Técnica: Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco **www.mucambo.com.br**