

MUCAMBO®

Sensitex® - ref: 106

LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA – SENSITEX – REF. 106

Luva cirúrgica esterilizada produzida à base de látex natural, formato anatômico, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e inerte. É a melhor opção para quem procura a combinação ideal entre a SENSIBILIDADE TÁTIL e PROTEÇÃO.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Material:** látex natural;
- **Tamanhos:** 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5;
- **Espessura média:** 0,21 mm;
- **Comprimento médio:** 28 cm;
- **Lubrificante:** pó bioabsorvível e inerte;
- **Esterilização:** feixe de elétrons ou raios gama;
- **Embalagem:** embalagem com 1 par; caixa com 200 pares;
- **Validade e Esterilidade do produto:** assegurada por 03 (três anos), enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco: www.mucambo.com.br



INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Fabricada por Mucambo S/A – Registro no Ministério da Saúde sob o Nº 10092410023 e Certificado de Autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego nº 39.317.
Conforme NBR ISO 10.282:2014 - Certificada pelo Sistema Brasileiro de CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ANVISA/INMETRO: RDC/ANVISA Nº 547/2021, PORTARIA DO INMETRO Nº 485/2021 - (ISO 9001-2015).

Contém o tamanho, tipo de esterilização, data de validade, lote, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, atendendo integralmente a Legislação Brasileira e Código de Defesa do Consumidor.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o aortal cirúrgico com o punho da própria luva;
6. Este produto deve ser conservado em área arejada, protegido de luz solar, fonte de calor e umidade;
7. Produto de Uso Único – Destruir após o uso.