

LUVA DIAL SÉRIE 101

Dial®


Ref: 101 - Qualidade

MUCAMBO®

Luva não esterilizada produzida à base de látex natural, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e formato anatômico. É recomendada para uso em procedimentos gerais em que haja a necessidade de um produto com características superiores às de luvas para procedimentos não cirúrgicos.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

NOME TÉCNICO: luvas descartáveis

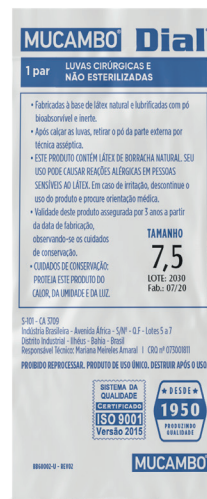

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS COMERCIAIS: SÉRIE 101

Material: Luva de Látex Natural Anatômica

Tamanhos: 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5

Espessura média: 0,21 mm

Comprimento médio: 28 cm

Esterilização: Não esterilizada

Lubrificante: Com pó

Superfície: Lisa

Tipo: 1

Embalagem: Embalagem com 1 par/ caixa com 250 pares

VALIDADE: 3 anos

COMPOSIÇÃO: 100% Látex Natural

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

REGISTRO ANVISA nº: 82850570001

CERTIFICADO DO PRODUTO Nº: 010393-03/2023

INDICAÇÃO DE USO

Para utilização em procedimentos não cirúrgicos para assistência a saúde.

MODO DE USO

1. Abrir o envelope com as pontas dos dedos;
2. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
3. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e colocar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
4. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas, se necessário.

CONTEÚDO

As luvas são expostas à venda em envelopes que contêm 1 (um) par que, por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque com capacidade para 250 pares de luvas nos tamanhos de 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Devem ser respeitadas as indicações previstas na caixa de embarque para não comprometer a integridade do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Produto de reprocessamento proibido, de acordo com o item 47 da RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser realizado impreterivelmente após o uso em conformidade com a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E EFEITOS ADVERSOS

Proibido reprocessar. Uso único.

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

Em caso de irritação, descontinue o uso do produto.

CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado para pessoas sensíveis ao látex.

FABRICADO POR

Razão Social: NEWELL BRANDS BRASIL LTDA

CNPJ: 60.594.538/0016-80

Endereço: Av Africa, s/n, quadra F, lote 5 a 7 - parte - distrito industrial – Iguape - CEP: 45.658-468 - Ilhéus/BA

Site: <https://www.newellbrands.com/>

Atendimento ao consumidor: 0800 075 4638 | (11) 2133.3000

Autorização de Funcionamento na ANVISA Nº: 8.28505-7

Responsável Técnica: Mariana Meireles Amaral – CRQ/BA nº 073001811

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco www.mucambo.com.br